



# REINIGUNG UND PFLEGE

# REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE

Alle MEYRA Polsterteile und Bezugsstoffe sind mit einem Label mit Wasch- und Pflegehinweisen ausgestattet. Bitte beachten Sie diese Hinweise bei der Reinigung Ihres Produktes.

## Symbole auf der Waschanleitung



Feinwaschgang bei der angegebenen maximalen Waschtemperatur in °C.



Normalwaschgang bei der angegebenen maximalen Waschtemperatur in °C.



Handwäsche



Nicht Bleichen.



Nicht Trockner geeignet.



Nicht Bügeln.



Nicht chemisch Reinigen.

## **Reinigung und Desinfektion**

Vor dem Reinigen und Desinfizieren des Rollstuhles muss loser Grobschmutz, wie z.B. Lebensmittlrückstände, Haare im Bereich der Lenkrollen oder starke Verschmutzung, entfernt werden. Anschließend kann die Reinigungslösung aufgetragen werden. Vor dem Desinfizieren muss die Reinigungslösung nach Herstellerempfehlung abgespült werden. Das Desinfektionsmittel wird aufgesprüht oder über Wischtechnik aufgetragen und je nach Herstellerempfehlung ggf. abgespült.

## **Reinigungs- und Desinfektionsmittel**

Es sind pH-neutrale Reinigungs- und Desinfektionsmittel (pH 7) empfohlen. Saure (pH 1-6) bzw. alkalische (8-14) Reinigungs- und Desinfektionsmittel können Kunststoffteile, Oberflächenbeschichtungen oder Klebeverbindungen angreifen.

Zugelassen sind beim Robert-Koch-Institut und beim Verbund für Angewandte Hygiene e.V. gelistete Desinfektionsmittel.

## **Bezugsteile**

Die Bezüge für Sitzgurte, Rückengurte und Sitzkissen sollten im Schonwaschgang bei 30 °C gewaschen werden. Bei höheren Waschttemperaturen können die Bezugstoffe schrumpfen. Innen liegende Schaumteile, wenn möglich, vorher entnehmen, da auch diese durch den Waschvorgang schrumpfen können. Bei den Schaumteilen empfiehlt sich eine Tauchreinigung bzw. Tauchdesinfektion. Beschädigte Polsterteile müssen ausgetauscht werden. Haftbänder (bei Klettverbindungen) müssen abgedeckt werden, um Oberflächenschäden zu vermeiden. Ist es nicht möglich, die Haftbänder abzudecken, wird eine Handwäsche empfohlen.

**Für einzelne Produkte können die Pflegehinweise abweichen. Bitte beachten Sie die Angaben in der Bedienungsanleitung Ihres Produktes.v**

